

# Baby.i Wristband

## 說明書

---




# 快速入門

感謝您選擇與藍牙連接的 **Baby.i Wristband** 是一種透過藍牙4.0 版本的低耗能產品。它可以在嬰兒的手和腿上佩戴, 並在設置藍牙連接的範圍內通過指定的應用程式連接智能手機。**Baby.i Wristband** 可以測量和記錄嬰兒的體溫和運動資料, 家長可以在連接後通過智慧手機監控這些資料。**Baby.i Wristband** 應用程式提供餵食通知, 換尿布和體溫警報。

借助我們的低耗能技術, CR2032 鋰電池壽命可以延長。

## 包裝內含:

- 主機
- 膠帶
- CR2032 電池 x 1
- 說明書 x 1 頁

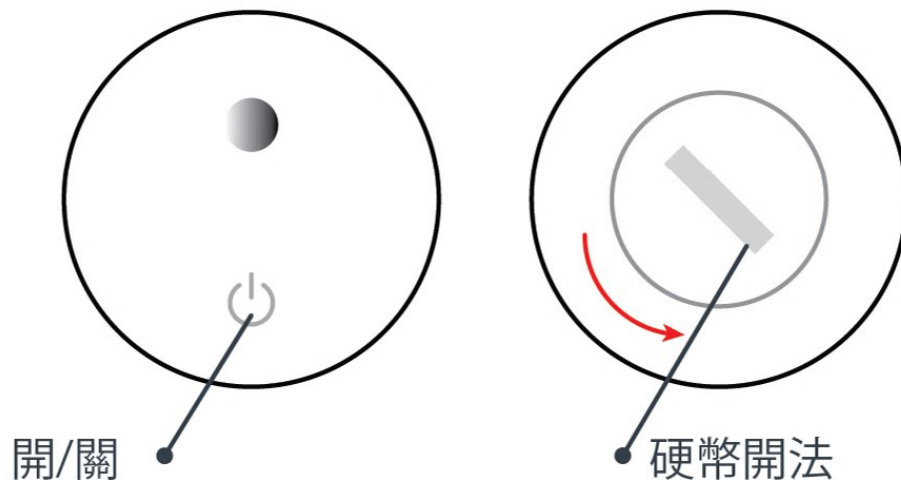

開關:

開機: 按住 "開關" 按鈕 2秒鐘, 直到看到指示燈亮起, 然後持續亮起閃光燈。

關機: 按住 "開關" 按鈕 2秒鐘, 直到短閃光燈亮起

。

連接

1. 打開 **baby Wristband**, 打開您的智慧手機和藍牙。

2. 打開 **baby.i wristband** 應用程式。



3. 選擇要在設備連接頁上連接的設備。對於第一次連接, 選擇名稱設置頁以創建嬰兒姓名和喜愛的圖示。(您可以稍後按一下控制項頁中的圖示按鈕進行重命名。)


4. 按一下按鈕連接設備。




多設備連接

1. **Baby.i Wristband** 應用程式允許智慧手機連接超過1台設備。


2. 在連接頁面上, 按一下圖示以切換設備。

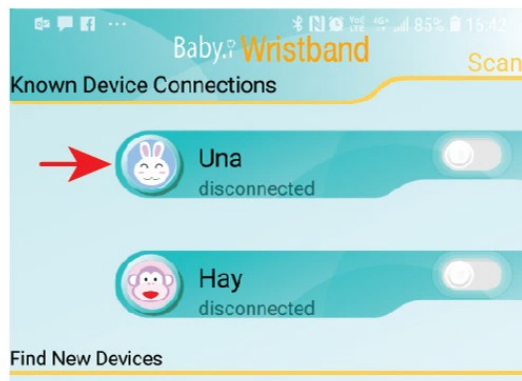


## Baby.i Wristband 應用程式

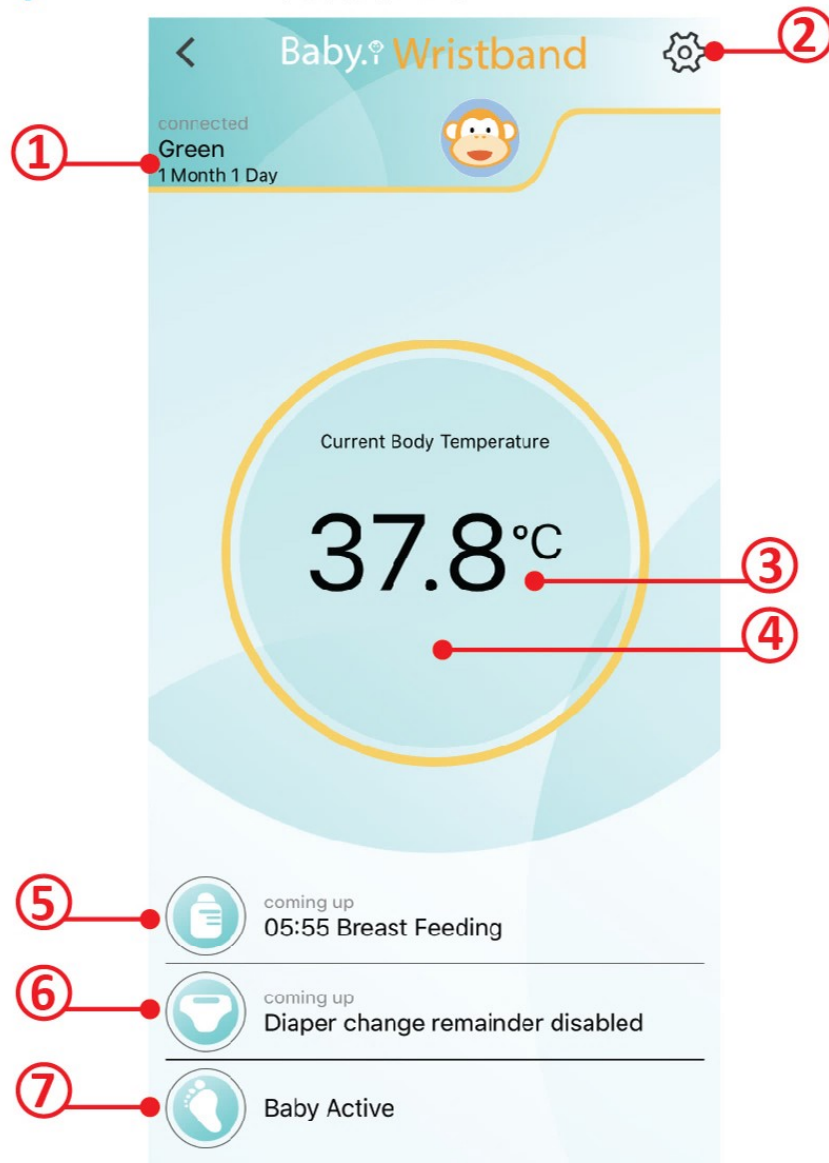

① 嬰兒詳細資訊: 重命名、出生日期、性別和圖示  
設置

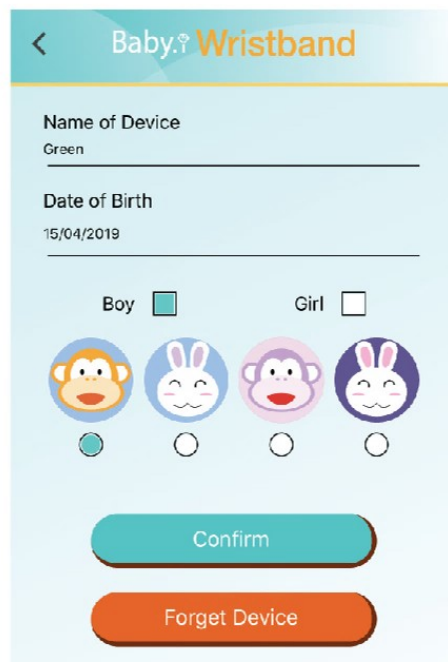

## ② 設定: - 體溫警報

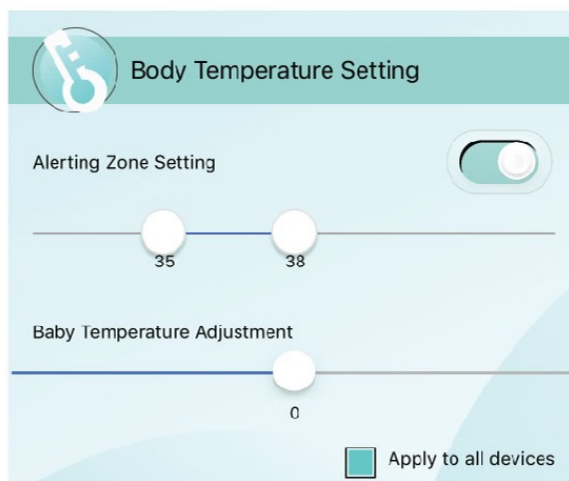

Body Temperature Setting

Alerting Zone Setting ☒


35 38

Baby Temperature Adjustment

0

☒ Apply to all devices


- 餵食 (你決定每天多少餐和什麼樣的食物, 然後添加第一餐的時間。餵食時程表會列出並及時通知你。)

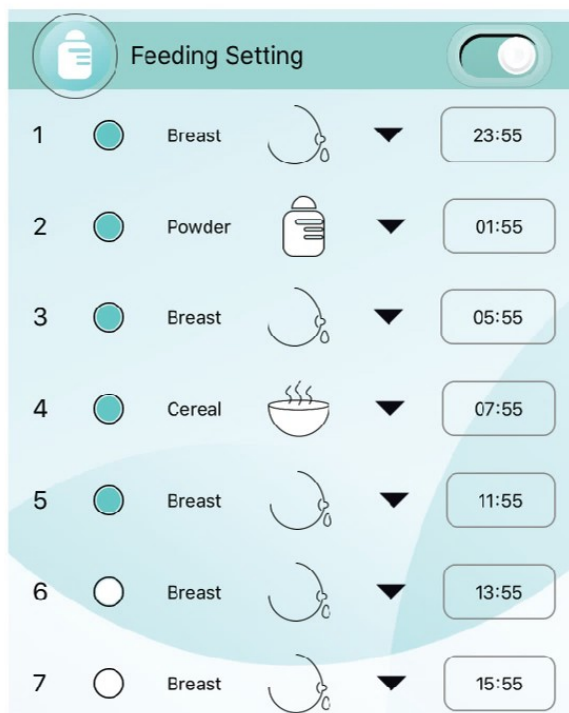

Feeding Setting ☒

|   |                                  |        |                                                                                     |   |       |
|---|----------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 1 | <input checked="" type="radio"/> | Breast |    | ▼ | 23:55 |
| 2 | <input checked="" type="radio"/> | Powder |   | ▼ | 01:55 |
| 3 | <input checked="" type="radio"/> | Breast |  | ▼ | 05:55 |
| 4 | <input checked="" type="radio"/> | Cereal |  | ▼ | 07:55 |
| 5 | <input checked="" type="radio"/> | Breast |  | ▼ | 11:55 |
| 6 | <input type="radio"/>            | Breast |  | ▼ | 13:55 |
| 7 | <input type="radio"/>            | Breast |  | ▼ | 15:55 |

- 換尿布 (你決定飯前/飯後多久。為您及時通知。)

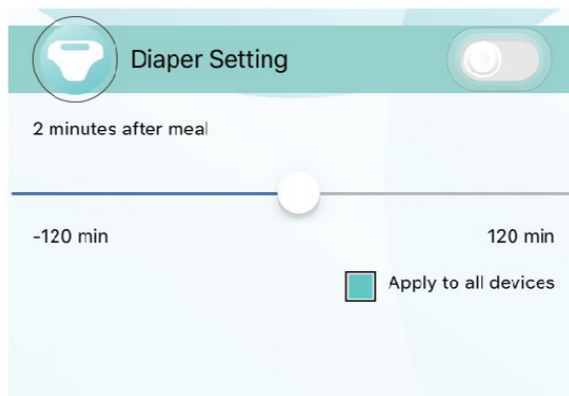


Diaper Setting ☐

2 minutes after meal

-120 min 120 min

☒ Apply to all devices

- ③ 當前體溫
- ④ 體溫圖表

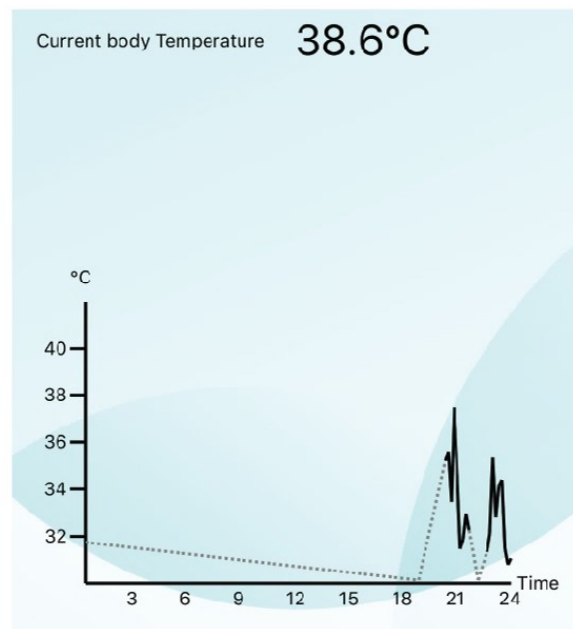

- ⑤ 餵食計畫
- ⑥ 換尿布計畫
- ⑦ 身體活躍-記錄和分析嬰兒每天的運動量。

注意: 如果您在後端操作中運行 **baby. i Wristband** 應用程式 (即開動另一個應用程式或鎖定設備), 則該應用程式可能無法喚醒並顯示 (溫度) 警報。這是由於 iOS 保護系統資源消耗或 Android 許可權限制。我們強烈建議在需要監視和警報功能時, 將應用保持活動狀態。

**Baby.i Wristband App**  
應用程式可以從下載;



[www.innohub-iproduction.com](http://www.innohub-iproduction.com)